

NÁVOD K POUŽITÍ

TENTO LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE A OČNÍ SPECIALISTY O POUŽITÍ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU. PEČLIVĚ SI JEJ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU BUDOUCÍ POTŘEBU. APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK BY MĚL VŽDY PROVÁDĚT OČNÍ SPECIALISTA. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY OČNÍHO SPECIALISTY A VŠECHNY NÁVODY KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK.

OZNAČENÍ VÝROBKU (název)

Sférické čočky:

- Jednodenní kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™ (nelfilcon A)
- Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilcon A)

Torické čočky:

- Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A)

Multifokální čočky:

- Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A)

POPIS VÝROBKU

Materiál čočky tvoří přibližně 69 % vody a 31% polymeru nelfilcon A (polyvinylalkohol částečně acetalizovaný N-(formylmethyl)-akrylamidem), neiontového hydrogelu s vysokým obsahem vody.

- Do materiálu čoček se přidává barevná přísada [fitalcolcyanin (2-)] mědi, která jim dodává světle modré celoplošné zbarvení (manipulační zbarvení) usnadňující viditelnost při manipulaci.
- Tištěné znaky na torických kontaktních čočkách (z materiálu nelfilcon A) obsahují barevnou přísadu fitalcolcyaninovou zeleň.

TECHNICKÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Vlastnosti čočky

- Index lomu (v hydratovaném stavu) 1,38
- Spektrální propustnost
 - FOCUS™ DAILIES™ neurčeno
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus ≥ 94 %T při 610 nm a dioptrických hodnotách v rozmezí -0,50 D až -6,00 D; liší se v závislosti na dioptrické hodnotě
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric ≥ 92 %T při 610 nm
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal ≥ 92 %T při 610 nm a dioptrických hodnotách v rozmezí -10,00 D LO (nízká) až +6,00 D HI (vysoká); liší se v závislosti na dioptrické hodnotě
- Světelná propustnost:
 - FOCUS™ DAILIES™ 95 % ± 5 %
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus 95 % ± 5 %
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric 97 % +3 % / -5 %
 - DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal 97 % +3 % / -5 % při dioptrických hodnotách v rozmezí -10,00 D LO (nízká) až +6,00 D HI (vysoká); liší se v závislosti na dioptrické hodnotě
- Propustnost kyslíku (Dk): 26 x 10⁻¹¹ (cm²/s) (ml O₂/ml x mm Hg), měřeno při 35 °C (Fatt, korigovaný hraniční efekt) 69 % hmotnosti v normálním fyziologickém roztoku
- Obsah vody:

Dostupné parametry čoček

Jednodenní kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™

- Základní zakřivení: 8,6 mm
- Průměr: 13,8 mm
- Centrální tloušťka: 0,10 mm při -3,00 D (liší se v závislosti na dioptrické hodnotě)
- Dioptrické hodnoty: Minus: -0,50 D až -6,00 D (přírůstky 0,25 D)
-6,50 D až -10,00 D (přírůstky 0,50 D)
Plus: +0,50 D až +6,00 D (přírůstky 0,25 D)

Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus™

- Základní zakřivení: 8,7 mm
- Průměr: 14,0 mm
- Centrální tloušťka: 0,10 mm při -3,00 D (liší se v závislosti na dioptrické hodnotě)
- Dioptrické hodnoty: Minus: -0,50 D až -6,00 D (přírůstky 0,25 D)
-6,50 D až -15,00 D (přírůstky 0,50 D)
Plus: +0,50 D až +6,00 D (přírůstky 0,25 D)
+6,50 D až +8,00 D (přírůstky 0,50 D)

Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric

- Základní zakřivení: 8,8 mm
- Průměr: 14,4 mm
- Centrální tloušťka: 0,10 mm při -3,00 D (liší se v závislosti na dioptrické hodnotě)

Síla sféry	Hodnota cylindru	Osy
+4,00 až +0,25 D (0,25 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°
Plano až -6,00 D (0,25 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D -2,25 D	10° to 180° (10° přírůstky) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50 D až -8,00 D (0,50 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°
-8,50 D až -9,00 D (0,50 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

Jednodenní kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal

- Základní zakřivení: 8,7 mm
- Průměr: 14,0 mm
- Centrální tloušťka: 0,10 mm při -3,00 D (liší se v závislosti na dioptrické hodnotě)
- Dostupné dioptrické hodnoty: +6,00 D až -10,00 D (přírůstky 0,25 D)
Adice (ADD): LO (nízká) (max ADD +1,25), MED (střední) (max ADD +2,00), HI (vysoká) (max ADD +2,50)

PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL / POUŽITÍ

Měkké kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™, DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric a DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) působí jako refrakční médium, které sousedí se světelné paprsky na sítnici, pro korekci vidění.

CÍLOVÉ SKUPINY

Zamýšlená populace nositelů pro sférické měkké kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™ a DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilcon A), tvoří osoby 7leté a starší se zdravými očima, kteří potřebují korekci zraku (krátkozrakost nebo dalekozrakost), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

Zamýšlená populace nositelů pro torické měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A) tvoří osoby 7leté a starší se zdravými očima, kteří potřebují korekci zraku pro ametropii (krátkozrakost nebo dalekozrakost, s astigmatismem), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

Zamýšlená populace nositelů pro multifokální měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) tvoří osoby 40leté a starší se zdravými očima, kteří potřebují korekci zraku pro presbyopii (s nebo bez krátkozrakosti nebo dalekozrakosti), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

KLINICKÉ VÝHODY

Sférické měkké kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™ a DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Torické měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, s astigmatismem.

Multifokální měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s presbyopií s nebo bez krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

INDIKACE

Sférické měkké kontaktní čočky FOCUS™ DAILIES™ a DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilcon A) jsou určeny k optické korekci ametropie (myopie a hypermetropie) u osob bez očních onemocnění, s minimálním astigmatismem, který nenarušuje zrakovou ostrost.

Torické měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric (nelfilcon A) jsou určeny k optické korekci ametropie (myopie a hypermetropie, s astigmatismem) u osob bez očních onemocnění.

Multifokální měkké kontaktní čočky DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal (nelfilcon A) jsou určeny ke korekci presbyopie s nebo bez ametropie (myopie a hypermetropie) u osob bez očních onemocnění, s minimálním astigmatismem, který nenarušuje zrakovou ostrost.

PLÁN NOŠENÍ A VÝMĚNY

Čočky jsou pouze pro jednorázové použití, denní jednorázové nošení (méně než 24 hodin v bdělém stavu). Nejsou určeny k čištění ani dezinfekci a měly by být po jednom použití zlikvidovány.

KONTRAINDIKACE (důvody, proč nepoužívat)

Kontaktní čočky by se neměly nosit při některých zdravotních stavech nebo za určitých podmínek okolního prostředí. Stav, které mohou bránit nebo vadit bezpečnému nošení kontaktních čoček, jsou:

- Alergie, zánět, infekce nebo podráždění oka, jeho okolí nebo očních víček
- Nedostatečný slzný film (suché oko)
- Hypoestézie (snížená citlivost) rohovky
- Užívání jakýchkoli léků, včetně očních, které jsou kontraindikované nebo vadí při nošení kontaktních čoček
- Jakékoli systémové onemocnění, u něhož může nošení kontaktních čoček vést k novému rozvoji nebo které narušuje bezpečné nošení kontaktních čoček
- Při zarudnutí nebo podráždění očí

O těchto nebo jiných konkrétních stavech se poraďte s očním specialistou.

VAROVÁNÍ

- Čočky určené k dennímu nošení nejsou určeny k nošení přes noc. Čočky z materiálu nelfilcon A by se neměly používat během spánku.
- Závažná oční onemocnění včetně rohových vředů (ulcerózní keratitidy) se mohou velmi rychle rozvinout a vést ke ztrátě zraku.
- Nošení kontaktních čoček zvyšuje riziko očních infekcí. Riziko ulcerózní keratitidy u uživatelů kontaktních čoček ještě zvyšuje spání s čočkami nebo kouření.^{1,2}
- Uživatel je třeba poučit, že pokud zaznamená oční nepohoda, pocit cizího tělesa, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí oka nebo jiné oční problémy, musí si čočky ihned vyndat a rychle se obrátit na očního specialistu.
- Problémy s kontaktními čočkami a výrobky určenými k péči o ně by mohly vést k vážnému poranění oka. Je nezbytné nutné, aby nositelé kontaktních čoček dodržovali pokyny očního specialisty a všechny návody ke správnému používání čoček a výrobků určených k jejich ošetřování.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zvláštní bezpečnostní opatření pro očního specialistu

- Při výběru vhodného typu a parametru čočky by měl oční specialista brát v úvahu všechny vlastnosti čočky, které mohou ovlivňovat její funkci a zdraví očí, včetně propustnosti pro kyslík, středové a periferní tloušťky a průměru optické zóny.
- Zkušební čočky určené pro aplikační a diagnostický proces je třeba po jednom použití zlikvidovat a nesmí se použít u další osoby
- Předepisující oční specialista by měl při prvním nasazení pečlivě vyhodnotit a průběžně sledovat oční zdraví uživatele a fungování čočky na oku.
- Zlúťe barvivo fluorescein by se nemělo používat na čočky, které jsou nasazené na očích. Čočky toto barvivo pohltní a změní barvu.
- Může se stát, že uživatelé, kteří nosí kontaktní čočky korigující presbyopii, nedosáhnou nejlépe korigované zrakové ostrosti na dálku nebo na blízko. Zrakové požadavky jsou individuální a při výběru nejvhodnějšího typu čočky pro každého pacienta by se měly brát v úvahu.
- Diabetici mohou mít sníženou citlivost rohovky, a proto mají vyšší sklon k poranění rohovky a nehojí se stejně rychle či úplně jako nediabetičtí pacienti.
- V těhotenství, kojení nebo při užívání orální antikoncepce se mohou objevit změny vidění nebo změny snášenlivosti kontaktních čoček. Tyto osoby by měly být pečlivě sledovány z hlediska zraku, pohodlí nebo jiných očních změn.
- Oční specialisté by měli nositele poučit, aby si čočky okamžitě vyjmou, pokud dojde k zarudnutí nebo podráždění oka.
- Než uživatel odejde od očního specialisty, měli by být schopni rychle si čočky vyjmout, nebo by měli mít k dispozici někoho, kdo jim umí čočky vyjmout.
- Jsou nutná pravidelná oční vyšetření, která pomáhají zajišťovat stále zdraví uživatelových očí. Společnost Alcon doporučuje, aby nositelé navštěvovali očního specialistu alespoň jednou ročně nebo na jeho doporučení častěji.

Bezpečnostní pokyny pro zacházení s čočkami a nošení

- Každý den zkontrolujte, zda vaše oči vypadají dobře, zda se cítíte pohodlně a vidíte jasně.
- Čočky nepoužívejte, pokud je blistrový obal poškozený nebo není neprodělně uzavřen. Mohlo by tak dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- Pokud uživatel otevře fólii blistru dříve, než zamýšlí čočku použít, je třeba čočku vyhodit. Mohlo by dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti vašich očí by rozvrh nošení čoček měl určit oční specialista.
- Čočky se nesmějí čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Opakované použití může zvyšovat riziko podráždění oka, infekce nebo selhání výrobku způsobené opotřebením.
- Čočky nikomu nepůjčujte, protože se tak mohou šířit mikroorganismy, což by mohlo vést k závažnými očním zdravotním potížím.
- Kontaktní čočky nenechte přijít do styku s nesterilními kapalinami (včetně vody z vodovodu a slin), protože by mohlo dojít k mikrobiální kontaminaci, která může vést k trvalému poškození očí.
- Před použitím čoček při sportech, jako je plavání a činnostech spojených s vodou, se poraďte s očním specialistou. Vystavení nasazených kontaktních čoček vodě (zahrnující kohoutkovou vodu nebo jiným nesterilním kapalinám) při aktivitách jako sprchování, plavání, vodní lyžování a koupel ve vaně by mohlo zvýšit riziko oční infekce, včetně zánětu rohovky způsobeného prvky rodu *Acanthamoeba*.
- Pokud byly čočky vystaveny škodlivým nebo dráždivým výparům, vyjměte je z oka a vyhodte.
- Dehydratovanou nebo poškozenou kontaktní čočku vyhodte. Nahraďte ji čerstvou novou čočkou.
- Doporučujeme, aby nositelé kontaktních čoček navštěvovali očního specialistu nejméně jednou ročně nebo podle jeho pokynů.
- Informujte svého zaměstnavatele, že nosíte kontaktní čočky, zvláště pak v případech, že vaše práce vyžaduje používání pomůcek na ochranu očí.
- Poznamenejte si správnou dioptrickou hodnotu čočky pro každé oko. Před nasazením čočky zkontrolujte, zda jsou dioptrické čočky na každém blistrovém balení správné pro dané oko.
- Neměňte typ nebo parametry čočky bez porady s očním specialistou.
- Po dlouhodobém přerušení nošení čoček se před opětným zahájením nošení poraďte s očním specialistou.
- Dávejte pozor při používání mýdel, pletových mlék, krémů, kosmetických přípravků či deodorantů, protože pokud se dostanou do kontaktu s čočkami, mohou způsobit podráždění.
- Čočky si nasazujte před naličením a vyjměte je z očí před odlícením.
- Vždy s sebou noste náhradní čočky nebo mějte po ruce náhradní brýle.
- Čočky nepoužívejte po uplynutí doby jejich použitelnosti (data expirace).

Další informace o multifokálních a monovizních čočkách

- Pro korekci presbyopického vidění se používají multifokální nebo bifokální čočky a monovizní, jedná se o dvě běžné metody použití kontaktních čoček. Stejně jako bifokální, trifokální nebo bryle s postupným přidáváním, mají multifokální kontaktní čočky oddělené dioptrické hodnoty pro vidění na dálku a na blízko v každé čočce. To umožňuje nositelé používat obě oči pro vidění na všechny vzdálenosti. Korekce monovize zahrnuje použití standardních jednonohovkových čoček s čočkou na dálku na jednom oku a čočkou na blízko na druhém oku.
- Stejně jako u každého typu korekce pomoci čočky, existují také výhody a kompromisy s multifokální nebo monovizní korekcí. Použitím těchto kontaktních čoček může být výhoda jasnějšího vidění na blízko při přímém pohledu a pohledu vzhůru, doprovázena snížením vidění na určité vzdálenosti nebo za určitých světelných podmínek. Některí jedinci, zejména ti, kteří nosí monovizi, mohou zaznamenat snížené vnímání hloubky a někteří mohou mít potíže s adaptací. Příznaky, jako je mírné rozmazání, závratě nebo bolesti hlavy, mohou trvat krátce nebo několik týdnů, podle toho, jak probíhá adaptace. Čím déle tyto příznaky přetrvávají, tím je větší prognóza neuspěšné adaptace.
- V období adaptace se doporučuje nosit tyto kontaktní čočky pouze v běžných situacích, které nejsou zrakově náročné. Například se vyhněte řízení automobilu, dokud vám multifokální nebo monovizní korekce nebude vyhovovat. Pokud nelze splnit požadavky pro držení řidičského průkazu, pak se řízení s tímto typem korekce čočky nedoporučuje.
- Pro některé nositele nikdy nebude zcela pohodlné fungovat při slabém osvětlení, jako je řízení v noci. Tento problém by měl být prodiskutován s očním specialistou. Pokud je vyžadováno ostré vidění na dálku, mohou být doporučeny další kontaktní čočky, aby bylo možné obě oči plně korigovat na dálku.
- Při delší práci na blízko, která vyžaduje velmi ostré vidění na blízko, může být užitečné nosit přes kontaktní čočky brýle nebo mít k dispozici další kontaktní čočky s různou silou, speciálně upravené pro tento úkol. Tento typ problému může pomoci vyřešit oční specialista.
- Je důležité řídit se radami očního specialisty ohledně adaptace na presbyopickou korekci zraku. Během adaptačního období si pečlivě všimněte všech konkrétních situací, které se zdají být nebezpečné nebo kde není možné efektivně fungovat, a podle potřeby je prodiskutujte s očním specialistou.
- Rozhodnutí používat multifokální čočky nebo korekci monovize by mělo být učiněno ve spolupráci s očním specialistou a pouze po pečlivém zvážení a projednání všech zrakových potřeb.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY (možné problémy)

Při nošení kontaktních čoček mohou nastat problémy, které se mohou projevit jedním nebo více následujícími znaky a příznaky:

- zarudnutí oka
- pálení a štípání
- oční diskomfort
- podráždění
- bolest
- zánět
- závrátě
- vizuální poruchy
- rozmazané vidění
- dioplie (dvojitě vidění)
- fotofobie (citlivost na světlo)
- bolest hlavy
- pocit suchého oka

Tyto příznaky a symptomy mohou být spojeny s více stavy, včetně:

- edém rohovky (otok)
- oděr rohovky

- vaskularizace rohovky
- mikrobiální infekce
- ulcerózní keratitida (rohovkový vřed)
- alergická odpověď / přecitlivělost
- toxická reakce
- subkonjunktivální krvácení
- snížení zraku (dočasné nebo trvalé)

Pokud jsou tyto příznaky, symptomy a stavy ignorovány, mohou vést k závažnějším komplikacím.

CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM

Pokud se objeví některé z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě čočku (čočky) vyjměte:

- Prohlédněte postižené oko nebo oči v zrcadle a pátrejte po známkách čehokoli neobvyklého.
 - Pokud nepohoda nebo problém přestane, nasadte si novou, nepoužitou čočku.
 - Pokud nepohoda nebo problém nepřestane nebo se po nasazení nové čočky či obou čoček objeví znovu, čočku nebo čočky vyjměte a okamžitě se obraťte na očního specialistu.
- Může jít o závažný stav jako infekce, rohovkový vřed (ulcerózní keratitida) nebo zánět duhovky. Tyto stavy by mohly rychle postupovat a vést k trvalé ztrátě zraku. Méně závažné reakce jako oděrky, zabarvení epitelu a bakteriální zánět spojivek je nutné řádně léčit a ošetřit, aby se zamezilo komplikacím.
- Od občasných suchosti lze ulevit několikařím intenzivním zamrknáním nebo aplikací zvlhčujících kapek, které jsou schválené k použití na kontaktní čočky. Pokud suchost přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka přilepí (přestane se pohybovat), aplikujte několik kapek zvlhčujícího roztoku určeného pro kontaktní čočky a počekejte, dokud se čočka nezačne na oku volně pohybovat. Pokud tento problém přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka na oku posune ze středu, je možné ji vrátit doprostřed oka takto:
 - Zavřete oči a jemným masírováním víček posuňte čočku na místo;
 - nebo se divejte se ve směru čočky a jemně mrkejte;
 - nebo mírně zatlačte decentrovanou čočku na rohovku lehkým tlakem prstu na okraj horního či dolního víčka.
- Pokud se vám čočka v oku roztrhne, opatrně kousky vyjměte stisknutím mezi prsty stejně jako při normálním vyjímání čočky. Pokud se zdá, že kousky čočky nepůjde vyjmout snadno, neštipujte do oční tkáně. Vypláchněte oko sterilním fyziologickým roztokem a znovu zkuste kousky čočky vyjmout. Pokud to nepomůže, vyhledejte pomoc očního specialisty.

Všeobecné nouzové situace:

Pokud dojde k pořísnění očí chemikáliemi jakéhokoli druhu (produkty pro domácnost, zahradnické roztoky, laboratorní chemikálie atd.):

- Oči okamžitě vypláchněte fyziologickým roztokem nebo vodou z vodovodu.
- Vyjměte a zlikvidujte čočku a okamžitě kontaktujte svého očního specialistu nebo bez prodlení navštivte nemocniční pohotovost.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Každou závažnou mimořádnou událost související s použitím tohoto zdravotnického prostředku je třeba hlásit společnosti Alcon Laboratories, Inc.:

EU - Obratse se na místní zastoupení ve své zemi nebo na distributora výrobků Alcon.

Email: qa.complaints@alcon.com

Webové stránky: <https://www.alcon.com/contact-us>

Závažné mimořádné události je třeba oznámit také místnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky ve vaší zemi.

NÁVOD K POUŽITÍ

Každý den použijte nový pár čoček, který se na konci denní doby nošení vyhodí.

POKYNY PRO MANIPULACI S ČOČKAMI

- Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy důkladně umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- Před otevřením jemně zatřepejte blistrovým obalem.
- Vyjměte čočku z blistru tak, že si ji opatrně vylijete do dlaně.
- Ujistěte se, že je čočka správnou stranou ven a že se chystáte použít správnou čočku pro každé oko.
- Před nasazením čočky prohlédněte.
- Poškozené nebo nečisté čočky si nenasazujte.

POKYNY PRO NASAZENÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK

- Před nasazením čoček vždy zkontrolujte, zda je síla čočky na každém blistrovém balení správná pro každé oko, a nepoužívejte čočky po datu expirace.
- Před manipulací s kontaktními čočkami si důkladně umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- Položte si čočku na bríško čistého a suchého praveho nebo levého ukazováčku. Prostředník stejné ruky přiložte k dolním řasám a stáhněte dolní víčko dolů.
- Prsty druhé ruky posuňte nahoru horní víčko.
- Umístěte čočku přímo na oko (rohovku) a jemně odťáhněte prst od čočky.
- Podívejte se dolů a pomalu pusťte dolní víčko.
- Podívejte se rovně před sebe a pomalu pusťte horní víčko.
- Jemně zamrkejte.

POKYNY PRO VYJMUTÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK

- Důkladně si umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- Několikrát intenzivně zamrkejte.
- Divejte se nahoru a konečkem prstu posuňte čočku dolů na bílou část oka.
- Vyjměte čočku tak, že ji jemně sevřete mezi palcem a ukazováčkem. Neštipněte do oční tkáně.
- Pokud je vyndávání čočky obtížné, kápněte do oka lubrikační a zvlhčující kapky a po několika minutách zkuste čočku vyjmout znovu.
- K vyjímání čoček z pouzdra nebo z očí nikdy nepoužívejte pinzety, přísavky, ostré předměty nebo nehty.

V případě potíží s vyjmutím čočky (čočka není uprostřed nebo je poškozená) se řiďte výše uvedenými **pokyny CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM**.

ROZTOKY PRO PÉČI O KONTAKTNÍ ČOČKY

Denní jednorázové kontaktní čočky v materiálu nelfilcon A nejsou určeny k použití se systémem péče o kontaktní čočky. Tyto kontaktní čočky jsou určeny pouze k jednorázovému nošení po dobu jednoho dne. Nesmějí se čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Vždy mějte k dispozici náhradní čočky nebo náhradní brýle.

POKYNY K NASAZENÍ PRO OČNÍ SPECIALISTY

Oční zdraví a refrakční vlastnosti nezbytné k úspěšnému nasazení měkkých kontaktních čoček nelfilcon A jsou podobné jako u jiných měkkých kontaktních čoček. Mělo by být provedeno důkladné předběžné vyšetření, aby se zajistilo, že daný uživatel je vhodným kandidátem na nošení měkkých kontaktních čoček. Další informace naleznete na adrese www.ifu.alcon.com.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Kontaktní čočky a materiál použitý na uzavření blistrů vyhazujte do popelnice, nikoli do toalety nebo umyvadla. Kartónový obal a polypropylenovou (PP) plastovou vaničku blistru je třeba vyhodit do popelnice nebo recyklovat podle místních postupů nakládání s odpadem.

OBSAH BALENÍ (jak se dodává)

Každá čočka je uložena v plastovém blistrovém obalu uzavřeném zatavenou fólií, který obsahuje izotonický fosfátém – acetátem puřovaný fyziologický roztok a je sterilizovaný párou. Fyziologický roztok pro uchování čoček FOCUS™ DAILIES™ v obalu může obsahovat až 0,02 % poloxameru. Fyziologický roztok pro uchování čoček DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric a DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal obsahuje polyethylenglykol (PEG) a hydroxypropyl methylcelulózu (HPMC) a může obsahovat až 0,05 % poloxameru.

Na blistrovém obalu jsou vyznačeny parametry čočky: základní zakřivení, průměr, dioptrickou hodnotu, číslo výrobní šarže, datum výroby a datum expirace. Kromě toho označení torických čoček obsahuje hodnotu cylindru a osy, a označení multifokálních čoček obsahuje hodnotu adice (ADD).

Etiketa na obalu může obsahovat také kód výrobku: DD02 pro FOCUS™ DAILIES, DD03 pro DAILIES™ AquaComfort™ Plus, DD03T pro DAILIES™ AquaComfort™ Plus Toric nebo DD03MF pro DAILIES™ AquaComfort™ Plus Multifocal.

Čočky z materiálu nelfilcon A se dodávají sterilní v proužcích po 5 blistrech uzavřených zatavenou fólií, v krabicích obsahujících až 100 jednotlivě balených kontaktních čoček.

ZKRATKY A SYMBOLY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITÝ V OZNAČENÍ VÝROBKU

ZKRATKA / SYMBOL	DEFINICE
BC	Základní zakřivení
DIA	Průměr
PWR	Dioptrická hodnota
D	Dioptrie (jednotka dioptrické hodnoty čočky)
L	Levá
R	Pravá
ADD	Adice
MAX ADD	Maximální adice
CYL AXIS	Cylindr a osa
LO	Nízká
MED	Střední
HI	Vysoká
	Značka licence pro obalový odpad
	Nepoužívat opětovně
	Číslo šarže
	Použit do data
EXP	Datum expirace (použitelné do)
	Systém jedné sterilní bariéry
	Sterilizováno parou
	Evropská značka shody
	Angličtina (příklad dvoumístného kódu jazyka)
	Pozor (výstraha)
	Čtěte <i>návod k použití</i> nebo čtěte elektronický <i>návod k použití</i> .
	Nepoužívej, pokud je blistr poškozen a postupujte podle <i>návodu k použití</i>
	Výrobce
	Datum výroby
	Zdravotnický prostředek
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii
	Nevyhazujte čočky do toalety nebo dřezu
	Pozor: Podle federálních zákonů (USA) se tento prostředek smí prodávat pouze prostřednictvím očního specialisty s licencí nebo na jeho objednávku.

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

 0123

 Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgie

Dovozce:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Německo

Tento **Návod k použití** pro kontaktní čočky je také k dispozici na webových stránkách společnosti Alcon: www.ifu.alcon.com

Alcon

Datum vydání: 2024-11

900491294-1124

© 2024 Alcon Inc.

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.
² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *The New England Journal of Medicine*. 1989; 321 (12): 773-783.



900491294-1124