

NÁVOD K POUŽITÍ

TENTO LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE A OČNÍ SPECIALISTY O POUŽITÍ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU. PEČLIVĚ SI JEJ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU BUDOUCÍ POTŘEBU. APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK BY MĚL VŽDY PROVÁDĚT OČNÍ SPECIALISTA. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY OČNÍHO SPECIALISTY A VŠECHNY NÁVODY KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK.

OZNAČENÍ VÝROBKU (název)

Jednodenní kontaktní čočky **PRECISION1™** (verofilcon A)

Jednodenní kontaktní čočky **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A)

POPIS VÝROBKU

Materiál čočky se skládá z přibližně 51 % vody a 49 % verofilconu A, hydrogelu obsahujícího silikon. Do materiálu čoček se přidává barevná přísada, reaktivní modř 247, která jim dodává světle modré celoplošné zbarvení (manipulační zbarvení), usnadňující viditelnost při manipulaci. Čočka dále obsahuje aditivum (benzotriazolový UV absorbující monomer), které blokuje UV záření. Propustnost je menší než 1 % v rozsahu UVB od 280 nm do 315 nm a menší než 10 % v rozsahu UVA od 316 nm do 380 nm, v celém rozsahu energie.

TECHNICKÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Vlastnosti čočky:

- Index lomu (v hydratovaném stavu): 1,4
- Spektrální propustnost: ≥ 90 % (při 640 nm, -3,00 D)
- Propustnost kyslíku (Dk): 90×10^{-11} (cm²/s) (ml O₂/ml x mm Hg), měřeno při 35 °C (vnitřní Dk - coulometrická metoda)
- Obsah vody: 51 % podle hmotnosti v normálním fyziologickém roztoku
- Obsah vody na povrchu: ≥ 80%

Dostupné parametry čoček

Kontaktní čočky **PRECISION1™** (verofilcon A) (sférické)

- Průměr: 14,2 mm
- Středová tloušťka: 0,09 mm při -3,00 D (liši se v závislosti na dioptrické hodnotě)

• Zakřivení a dioptrické hodnoty:

- o Zakřivení: 8,3 mm
- Minusové hodnoty: -0,50 D až -6,00 D (přírůstky po 0,25 D)
- 6,50 D až -12,00 D (přírůstky po 0,50 D)
- +0,50 D až +6,00 D (přírůstky po 0,25 D)
- +6,50 D až +8,00 D (přírůstky po 0,50 D)

- Plusové hodnoty:

Kontaktní čočky **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A) (torické)

- Průměr: 14,5 mm
- Centrální tloušťka: 0,10 mm při -3,00 D (liši se v závislosti na dioptrické hodnotě)

• Zakřivení:

• Dioptrické hodnoty a osy:

Sféra	Hodnota cylindru:	Osy
+0,25 až +4,00 D (0,25 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2,25 D	10°, 20°, 160°, 170°, 180°
Plano do -6,00 D (0,25 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D	10° až 180° (přírůstky po 10°)
	-2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50 až -8,00 D (0,50 D přírůstky)	-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	-2,25 D	10°, 20°, 160°, 170°, 180°

PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL / POUŽITÍ

Měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** a **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A) působí jako refrakční médium, které soustředí světelné paprsky na sítnici.

CÍLOVÉ SKUPINY

Zamýšlená populace nositelů pro sférické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** (verofilcon A), tvoří osoby 7leté a starší se zdravýma očima, kteří potřebují korekci zraku (myopie nebo hypermetropie), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

Zamýšlená populace nositelů pro torické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A) tvoří osoby 7leté a starší se zdravýma očima, kteří potřebují korekci zraku (myopie nebo hypermetropie, s astigmatismem), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

KLINICKÉ VÝHODY

Sférické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** (verofilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Torické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, s astigmatismem.

INDIKACE (důvody k použití)

Sférické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** (verofilcon A) jsou určeny k optické korekci ametropie (krátkozrakosti nebo dalekozrakosti) u osob bez onemocnění očí s minimálním astigmatismem, který nenarušuje zrakovou ostrost.

Torické měkké kontaktní čočky **PRECISION1™** for Astigmatism (verofilcon A) jsou určeny k optické korekci ametropie (krátkozrakosti nebo dalekozrakosti, s astigmatismem) u osob bez onemocnění očí.

PLÁN NOŠENÍ A VÝMĚNY

Měkké kontaktní čočky z materiálu verofilcon A jsou na jedno použití, pouze k jednorázovému dennímu nošení (méně než 24 hodin v době bdení).

KONTRAINDIKACE (důvody, proč nepoužívat)

Kontaktní čočky by se neměly nosit při některých zdravotních stavech nebo za určitých podmínek okolního prostředí. Stav, který mohou bránit nebo vadit bezpečnému nošení kontaktních čoček, jsou:

- Alergie, zánět, infekce nebo podráždění oka, jeho okolí nebo očních víček
- Nedostatečný slzný film (suché oko)
- Hypoestézie rohovky (snížená citlivost)
- Užívání jakýchkoli léků, včetně očních, které jsou kontraindikované nebo vadí při nošení kontaktních čoček
- Jakékoli systémové onemocnění, které se může zhoršit nebo narušovat nošení kontaktních čoček
- Při zarudnutí nebo podráždění očí

O těchto nebo jiných konkrétních stavech se poraďte s očním specialistou.

VAROVÁNÍ

- Čočky určené k dennímu nošení nejsou určeny k nošení přes noc. Čočky z materiálu verofilcon A by se neměly používat během spánku.
- Závažná oční onemocnění včetně rohovkových vředů (ulcerózní keratitidy) se mohou velmi rychle rozvinout a vést ke ztrátě zraku.

- Nošení kontaktních čoček zvyšuje riziko očních infekcí. Riziko ulcerózní keratitidy u uživatelů kontaktních čoček se ještě zvyšuje při spaní s čočkami nebo kouření, případně obojím.^{1,2}
- Nositele je třeba poučit, že pokud zaznamená oční nepohodu, pocit cizího tělesa, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí oka nebo jiné oční problémy, musí si čočky ihned vyjmout a rychle se obrátit na očního specialistu.
- Problémy s kontaktními čočkami a výrobky určenými k péči o ně by mohly vést k vážnému poranění oka. Je nezbytně nutné, aby nositelé kontaktních čoček dodržovali pokyny očního specialisty a všechny návody ke správnému používání čoček a výrobků určených k jejich ošetřování.
- Kontaktní čočky pohlcující UV záření NENAHRAZUJÍ ochranné brýle nebo sluneční brýle. Brýle pohlcující UV záření by měly být nadále používány podle pokynů.
- Účinnost nošení kontaktních čoček absorbujících UV záření při prevenci nebo snížení výskytu očních poruch spojených s expozicí UV záření nebyla v současné době stanovena.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zvláštní bezpečnostní opatření pro očního specialistu

- Při výběru vhodného typu a parametrů čočky by měl oční specialista brát v úvahu všechny vlastnosti čočky, které mohou ovlivňovat její funkci a zdraví očí, včetně propustnosti pro kyslík, středové a periferní tloušťky a průměru optické zóny.
- Zkušební čočky určené pro aplikační a diagnostický proces je třeba po jednom použití zlikvidovat a nesmí se použít u další osoby.
- Předepisující oční specialista by měl při prvním nasazení pečlivě vyhodnotit a průběžně sledovat oční zdraví uživatele a fungování čočky na oku.
- Žluté barvivo fluorescein by se nemělo používat na čočky, které jsou nasazené na očích. Čočky toto barvivo pohltí a změní barvu.
- Diabetici mohou mít sníženou citlivost rohovky, a proto mají vyšší sklon k poranění rohovky a nehojí se stejně rychle či úplně jako nediabetičtí pacienti.
- V těhotenství, kojení nebo při užívání orální antikoncepce se mohou objevit změny vidění nebo změny snášenlivosti kontaktních čoček. Tyto osoby by měly být pečlivě sledovány z hlediska zraku, pohodlí nebo jiných očních změn.
- Oční specialisté by měli nositele poučit, aby si čočky okamžitě vyjmul, pokud dojde k zarudnutí nebo podráždění oka.
- Než uživatelé odejdou od očního specialisty, měli by být schopni rychle si čočky vyjmout, nebo by měli mít k dispozici někoho, kdo jim umí čočky vyjmout.
- Jsou nutná pravidelná oční vyšetření, která pomáhají zajišťovat stálé zdraví uživatelových očí. Společnost Alcon doporučuje, aby nositelé navštěvovali očního specialistu alespoň jednou ročně nebo na jeho doporučení častěji.

Bezpečnostní pokyny pro zacházení s čočkami a nošení

- Každý den zkontrolujte, zda vaše oči vypadají dobře, zda se cítíte pohodlně a vidíte jasně.
- Čočky nepoužívejte, pokud je blistrový obal poškozený nebo není neprodyšně uzavřen. Mohlo by tak dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- Pokud uživatel otevře fólii blistru dříve, než zamýšlí čočku použít, je třeba čočku vyhodit. Mohlo by dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti vašich očí by měl oční specialista stanovit plán nošení čoček.
- Čočky se nesmějí čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Opakované použití může zvyšovat riziko podráždění oka, infekce nebo selhání výrobku způsobené opotřebením.
- Čočky nikomu nepůjčujte, protože se tak mohou šířit mikroorganismy, což by mohlo vést k závažnými očním zdravotním potížím.
- Kontaktní čočky nenechte přijít do styku s nesterilními kapalinami (včetně vody z vodovodu a slin), protože by mohlo dojít k mikrobiální kontaminaci, která může vést k trvalému poškození očí.
- Před použitím čoček při sportech, jako je plavání a činnostech spojených s vodou, se poraďte s očním specialistou. Vystavení nasazených kontaktních čoček vodě (zahrnující kohoutkovou vodu nebo jiným nesterilním kapalinám) při aktivitách jako sprchování, plavání, vodní lyžování a koupel ve vaně by mohlo zvýšit riziko oční infekce, včetně zánětu rohovky způsobeného prvky rodu *Acanthamoeba*.
- Pokud byly čočky vystaveny škodlivým nebo dráždivým výparům, vyjměte je z oka a vyhoďte.
- Dehydratovanou nebo poškozenou kontaktní čočku vyhoďte. Nahraďte ji čerstvou novou čočkou.
- Doporučujeme, aby nositelé kontaktních čoček navštěvovali očního specialistu nejméně jednou ročně nebo podle jeho pokynů.
- Informujte svého zaměstnavatele, že nosíte kontaktní čočky, zvláště pak v případech, že vaše práce vyžaduje používání pomůcek na ochranu očí.
- Poznamenejte si správnou dioptrickou hodnotu čočky pro každé oko. Před nasazením čočky zkontrolujte, zda jsou dioptrie čočky na každém blistrovém balení správné pro dané oko.
- Nemějte typ nebo parametry čočky bez rady s očním specialistou.
- Po dlouhodobém přerušení nošení čoček se před opětným zahájením nošení poraďte s očním specialistou.
- Dávejte pozor při používání mýdel, pleťových mlék, krémů, kosmetických přípravků či deodorantů, protože pokud se dostanou do kontaktu s čočkami, mohou způsobit podráždění.
- Čočky si nasazujte před naličením a vyjímáte je z očí před odličením.
- Vždy s sebou noste náhradní čočky nebo mějte po ruce záložní brýle.
- Čočky nepoužívejte po uplynutí doby jejich použitelnosti (data expirace).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY (možné problémy)

Při nošení kontaktních čoček mohou nastat problémy, které se mohou projevit jedním nebo více následujícími znaky a příznaky:

- zarudnutí oka
- oční nepohodlí
- pálení a štipání
- pocit suchého oka
- rozmazané vidění
- poruchy vidění
- světloplachost (citlivost na světlo)
- podráždění
- bolest
- bolest hlavy
- zánět

Tyto příznaky a symptomy mohou být spojeny s několika stavy, včetně:

- snížené vidění (dočasné nebo trvalé)
- oděr rohovky
- otok rohovky
- mikrobiální infekce
- ulcerózní keratitida (vřed na rohovce), neinfekční
- alergická reakce / precitlivlost
- reakce na toxicitu

Pokud jsou tyto příznaky, symptomy a stavy ignorovány, mohou vést k závažnějším komplikacím.

CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM

Pokud se objeví některé z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě čočku (čočky) vyjměte:

- Prohlédněte postižené oko nebo oči v zrcadle a pátrejte po známkách čehokoli neobvyklého.
 - o Pokud nepohoda nebo problém přestane, nasadte si novou, nepoužitou čočku.
 - o Pokud nepohoda nebo problém nepřestane nebo se po nasazení nové čočky či obou čoček objeví znovu, čočku nebo čočky vyjměte a okamžitě se obraťte na očního specialistu.
- Může jít o závažný stav jako infekce, rohovkový vřed (ulcerózní keratitida) nebo zánět duhovky. Tyto stavy by mohly rychle postupovat a vést k trvalé ztrátě zraku. Méně závažné reakce jako oděry, zabarvení epitelu a bakteriální zánět spojivek je nutné řádně léčit a ošetřit, aby se zamezilo komplikacím.
- Od občasných suchosti lze ulevit několikerým intenzivním zamrknáním nebo aplikací zvlhčujících kapek, které jsou schválené k použití na kontaktní čočky. Pokud suchost přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka přilepí (přestane se pohybovat), aplikujte několik kapek zvlhčujícího roztoku určeného pro kontaktní čočky a počkejte, dokud se čočka nezačne na oku volně pohybovat. Pokud tento problém přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka na oku posune ze středu, je možné ji vrátit doprostřed oka takto:
 - o Zavřete oči a jemným masírováním víček posuňte čočku na místo;
 - o nebo se dívejte se ve směru čočky a jemně mrkejte;
 - o nebo mírně zatlačte decentrovanou čočku na rohovku lehkým tlakem prstu na okraj horního či dolního víčka.
- Pokud se vám čočka v oku roztrhne, opatrně kousky vyjměte stisknutím mezi prsty stejně jako při normálním vyjímání čočky. Pokud se zdá, že kousky čočky nepůjde vyjmout snadno, neštipějte do oční tkáně. Vypláchněte oko sterilním fyziologickým roztokem a znovu zkuste kousky čočky vyjmout. Pokud to nepomůže, vyhledejte pomoc očního specialisty.

Všeobecná první pomoc:

- Při stříknutí chemikálií jakéhokoli druhu (čisticích prostředků pro domácnost, zahradní chemie, laboratorních chemikálií atd.) do očí:
- Okamžitě oči vypláchněte fyziologickým roztokem nebo vodou z vodovodu.
 - Čočky vyjměte a vyhodte a ihned se obraťte na očního specialistu nebo neprodleně vyhledejte nemocniční pohotovost.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Každou závažnou mimořádnou událost související s použitím tohoto zdravotnického prostředku je třeba hlásit společnosti Alcon Laboratories, Inc.:

- Obráťte se na místní zastoupení ve své zemi nebo na distributora výrobků Alcon.
- Email: qa.complaints@alcon.com
- Webové stránky: <https://www.alcon.com/contact-us>

Závažné mimořádné události je třeba oznámit také místnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky ve vaší zemi.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Každý den použijte nový pár čoček, který se na konci denní doby nošení vyhodí.
- POKYNY K NASAZENÍ PRO OČNÍ SPECIALISTY**
- Oční zdraví a refrakční vlastnosti nezbytné k úspěšnému nasazení měkkých kontaktních čoček verofilcon A jsou podobné jako u jiných měkkých kontaktních čoček. Mělo by být provedeno důkladné předběžné vyšetření, aby se zajistilo, že daný uživatel je vhodným kandidátem na nošení měkkých kontaktních čoček. Další informace naleznete na adrese www.ifu.alcon.com.
- POKYNY K MANIPULACI S ČOČKOU**
- Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy důkladně umyjte a opláchněte ruce a osušte je čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
 - Blistrovým obalem před otevřením jemně zatřepejte.
 - Vyjměte čočku z blistru tak, že si ji opatrně vylijete do dlaně.
 - Ujistěte se, že je čočka správnou stranou ven a že se chystáte použít správnou čočku pro příslušné oko.
 - Před nasazením čočky prohlédněte.
 - Poškozené nebo nečisté čočky si nenasazujte.
- POKYNY K NASAZENÍ ČOČKY**
- Před nasazením čoček vždy zkontrolujte, zda je dioptrická hodnota čočky na každém blistrovém balení správná pro každé oko, a nepoužívejte čočky po datu expirace.
 - Před manipulací s kontaktními čočkami si důkladně umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
 - Položte si čočku na bříško čistého a suchého pravého nebo levého ukazováčku. Prostředník stejné ruky přiložte k dolním řasám a stáhněte dolní víčko dolů.
 - Prsty druhé ruky přitáhněte horní víčko nahoru.
 - Umístěte čočku přímo na oko (rohovku) a jemně od ní odtáhněte prst.
 - Podívejte se dolů a pomalu pouštějte dolní víčko.
 - Podívejte se rovně před sebe a pomalu pouštějte horní víčko.
 - Jemně zamrkejte.

POKYNY K VÝJMUTÍ ČOČKY

- Důkladně si umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- Několikrát intenzivně zamrkejte.
- Dívejte se nahoru a konečkem prstu posuňte čočku dolů na bílou část oka.
- Vyjměte čočku tak, že ji jemně sevřete mezi palcem a ukazováčkem. Neštipněte do oční tkáně.
- Pokud je vyjmutí čočky obtížné, ještě jednou si osušte prsty a zkuste to znovu. V tomto případě nepoužívejte zvlhčující kapky.
- K vyjímání čoček z pouzdra nebo z očí nikdy nepoužívejte pinzety, přísavky, ostré předměty ani nehty.

V případě potíží s vyjmutím čočky (čočka není uprostřed nebo je poškozená) se řiďte výše uvedenými **pokyny CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM**.

ROZTOKY PRO PÉČI O KONTAKTNÍ ČOČKY

Denní jednorázové kontaktní čočky z materiálu verofilcon A nejsou určeny k použití se systémem péče o kontaktní čočky. Tyto kontaktní čočky jsou určeny pouze k jednorázovému nošení po dobu jednoho dne. Nesmějí se čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Mějte vždy po ruce náhradní čočky nebo náhradní brýle.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Kontaktní čočky a materiál použitý na uzavření blistru vyhazujte do popelnice, nikoli do toalety nebo umyvadla. Kartónový obal a polypropylénovou (PP) plastovou vaničku blistru je třeba vyhodit do popelnice nebo recyklovat podle místních postupů nakládání s odpadem.

OBSAH BALENÍ (jak se dodává)

Každá čočka je zabalena v plastovém blistru uzavřeném zatavenou fólií, který obsahuje fosfátem pufrovaný fyziologický roztok s přibližně 0,3 % polymerových zvlhčovačel sestávajících z kopolymerů polyamidoaminu a kyseliny poly(akrylamid-akrylové), a je sterilizovaná parou. Na blistrovém obalu je vyznačeno zakřivení, průměr a dioptrická hodnota, hodnota cylindru a osa (pouze torické čočky), číslo výrobní šarže, datum výroby a datum expirace. Čočky se dodávají sterilní, v krabičkách obsahujících až 90 jednotlivě balených, neprodyšně uzavřených čoček.

ZKRATKY A SYMBOLY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY V OZNAČENÍ VÝROBKU

ZKRATKA / SYMBOL	DEFINICE
BC	Základní zakřivení
DIA	Průměr
PWR	Dioptrická hodnota
D	Dioptrie (jednotka dioptrické hodnoty čočky)
L	Levá
R	Pravá
UV	Ultrafialové
UVA	Ultrafialové A
UVB	Ultrafialové B
CYL	Hodnota cylindru
	Značka licence pro obalový odpad
	Nepoužívat opětovně
	Kód šarže
	Použit do data
EXP	Datum expirace (použitelné do)
	Systém jedné sterilní bariéry
	Sterilizováno parou
	Evropská značka shody
	Čeština (příklad dvoumístného kódu jazyka)
	Pozor (výstraha)
	Čtěte <i>návod k použití</i> nebo čtěte elektronický <i>návod k použití</i> .
	Nepoužívejte, pokud je blistr poškozen a postupujte podle <i>návodu k použití</i>
	Výrobce
	Datum výroby
	Zdravotnický prostředek
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Nevyhazujte čočky do toalety nebo dřezu
	Zplnomocněný zástupce v Evropské unii
	Pozor: Podle federálních zákonů (USA) se tento prostředek smí prodávat pouze prostřednictvím očního specialisty s licenci nebo na jeho objednávku.

 Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

 0123

 Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgie
Dovozce:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt
Německo

Tento **Návod k použití** pro kontaktní čočky je také k dispozici na webových stránkách společnosti Alcon: www.ifu.alcon.com

Datum vydání: 2024-09

900491613-0924

Alcon

© 2024 Alcon Inc.

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



900491613-0924