

BAREVNÉ MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

OBSAH

2 Měkké kontaktní čočky k nošení během dne po dobu jednoho měsíce (57 % PolyHEMA, 43 % voda) v pufovaném fyziologickém roztoku. Upozornění: Řiďte se prosím pokyny svého očního lékaře a pozorně si přečtěte návod k použití.

2 BAREVNÉ MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY

Vyrobeno v Koreji

TM[®] jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejich dceřiných společností © Bausch & Lomb Incorporated

POPS

Měkké kontaktní čočky Lacelle Tri-Kolor určené ke každodennímu používání po dobu jednoho měsíce v pufovaném fyziologickém roztoku. Z důvodu rozdílu mezi jedinci se prosím řiďte předpisem a pokyny svého očního lékaře týkajícími se vhodné doby použití během dne a frekvence výměny. Pokud se nebudete řídit radou svého očního lékaře, může dojít k podráždění nebo nepříjemným pocitům způsobeným nahromaděním nečistot z čočky. Budete-li vyměňovat čočky podle doporučení, budete se těšit z bezpečného vidění a budete se s čočkami cítit dobře. Tyto čočky jsou určeny k vyvážení nebo změně barvy očí a také k optické korekci refrakční vady (krátkozrakosti a dalekozrakosti)

URČENÉ POUŽITÍ

Jednohnohisková čočka používaná ke korekci zraku přímým vložením na rohovku.

OBECNÉ POKYNY

Před manipulací s čočkami si vždy pečlivě umyjte ruce a opláchněte je důkladně velkým množstvím vody. Osušte je čistým ručníkem, který z textilie neuvolňuje vlákna. S čočkami manipulujte nad volným čistým povrchem, který umožní, aby čočka v případě, že upadne, byla viditelná. Vždy začínejte nejprve s pravou čočkou, aby se předešlo její záměně za levou čočku. Po vyjmutí čoček s nimi zacházejte podle rady svého očního lékaře. Nezapomenejte, že je důležité i péče o puzdro na čočky. Puzdro je nutné každý den vyprázdnit, vyčistit a vysušit, aby nedošlo ke kontaminaci, a pravidelně ji vyměňovat.

NASAZENÍ PRAVÉ ČOČKY

1. Zjistěte, aby čočka nebyla vnitřní stranou ven. Umístěte čočku na pravý ukazováček, zkontrolujte její tvar a ujistěte se, že je čočka zcela čistá. (obr. 1 a obr. 2)
2. Ukazováčkem levé ruky a dalším prstem držte horní víčko rozvevřeně. Současně držte druhým prstem pravé ruky dolní víčko a dívejte se přímo na oko v zrcadle. Nyní můžete čočku opatrně vložit na oko. (obr. 3)

NASAZENÍ LEVÉ ČOČKY

Opakujte všechny výše popsané kroky.

VYJMUTÍ

1. Umyjte si a osušte ruce, jak je popsáno výše v části „Obecné pokyny“.
2. Dívejte se nahoru a přidržte dolní oční víčko dolů, opatrně sevřete dolní část pravé čočky prstím ukazováčku a prstím palcem, aniž byste se přitom dotýkali čočky nehty. Vyjměte čočku z oka. (obr. 4)
3. Stejný postup opakujte při vyjímání levé čočky.

DEZINFEKCE

Před zavedením a po vyjmutí vždy čočku vyčistěte roztokem na kontaktní čočky doporučeným očním lékařem. Obecně jsou naprosto vhodnými víceúčelové roztoky na hydrofilní kontaktní čočky, jako je např. víceúčelový roztok Bausch + Lomb Renu MultiPlus. Nepoužívejte roztoky na pevné nebo plynopropustné čočky, ani nepoužívejte tepelnou dezinfekci. Po vyjmutí čoček a po jejich dezinfekci podle pokynů čočky uchovávejte v pouzdře naplněném víceúčelovým roztokem Bausch + Lomb Renu MultiPlus.

KONTRAIKADIKACE

Čočky nepoužívejte v přítomnosti následujících stavů: suché oko, konjunktivitida, zánět, otok, přecitlivlost. Mohlo by to způsobit nepříjemné pocity jako jsou svědění, podráždění a překrvení.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Neuchopujte čočky nehty nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jejich poškození. Mějte stále na krátko ostříhané nehty. Nikdy nepoužívejte vodu z vodovodu, minerální vodu či jakýkoli produkt, který není doporučen pro měkké kontaktní čočky. Nepřipusťte, aby se do kontaktu s čočkami dostal sprej na vlasy ani jiný kosmetický aerosol. S nasazenými kontaktními čočkami neprovazujte žádné vodní sporty, pokud nepoužíváte těsně přiléhající plavecké brýle. Před spaním čočky vždy vyjměte. Čočky zavádějte před použitím make-upu, a před odstraněním make-upu je vyjměte. Před použitím jakéhokoli léčivého přípravku do očí se vždy poraďte s očním lékařem. Máte-li zarudlé nebo podrážděné oči, okamžitě čočky vyjměte a navštivte očního lékaře. Dodržujte pravidelné návštěvy u svého očního specialisty. Pokud je obal otevřený nebo poškozený, produkt nepoužívejte. Uchovávejte při pokojové teplotě. (1–30 °C)



G&G Contact Lens

(Beommul-dong), 401, 402, 502, 701, 802, 93, Beoman-ro, Suseong-gu, Daegu, Korea.

Advena Ltd.

Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swatara, BKR 4013 Malta

TM / ® are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates
© Bausch & Lomb Incorporated

FAREBNÉ MÄKKÉ KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

OBSAH

2 mäkké kontaktné šošovky na denné nosenie počas jedného mesiaca (57 % PolyHEMA, 43 % voda) v pufovanom fyziologickom roztoku. Upozornenie: Riadte sa predpisom svojho očného špecialistu a pozorne si prečítajte návod na použitie.

2 FAREBNÉ MÄKKÉ KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

Vyrobené v Kórei

TM[®] sú ochranné známky spoločnosti Bausch & Lomb Incorporated alebo jej sesterských spoločností © Bausch & Lomb Incorporated

OPIS

Mäkké kontaktné šošovky Lacelle Tri-Kolor určené na denné nosenie počas jedného mesiaca v pufovanom fyziologickom roztoku. Vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými osobami sa riadte predpisom a pokynmi svojho očného špecialistu, pokiaľ ide o vhodnú dobu nosenia počas dňa a frekvenciu výmeny. Nedodržavanie odporúčaní očného špecialistu môže viesť k podráždeniu alebo nepohodliu spôsobenému usadzovaním nečistôt na šošovkách. Výmena šošoviek podľa pokynov vám nepochybne prinesie bezpečné videnie a pohodlné nosenie šošoviek. Tieto šošovky sú určené na zlepšenie alebo zmenu viditeľnej farby oka, ako aj na optickú korekciu refrakčnej ametropie (krátkozrakosti a dalekozrakosti)

URČENÉ POUŽITIE

Jednohnohiskové šošovky, ktoré sa používajú na korekciu zraku priamym nasadením na rohovku.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pred manipuláciou so šošovkami si vždy starostlivo umyte ruky a dôkladne ich opláchnite veľkým množstvom vody. Osušte ich čistým uterákom bez volných textilných vlákien. So šošovkami manipulujte nad priehľadným, čistým povrchom, ak by niektorá z nich spadla. Vždy začínajte najprv s pravou šošovkou, aby ste zabránili jej zámene s ľavou. Po vybratí šošoviek ich ošetríte podľa odporúčaní svojho očného špecialistu. Nezabudnite, že veľmi dôležitá je aj starostlivosť o puzdro na šošovky. Každý deň by sa malo vyprázdnit, vyčistiť a osušiť, aby sa zabránilo jeho znečisteniu. Puzdro je potrebné pravidelne vymieňať.

VLOŽENIE PRAVEJ ŠOŠOVKY

1. Ustítte sa, že šošovka nie je prevrátená. Šošovku umiestnite na pravý ukazováč a skontrolujte jej tvar, pričom sa uistite, že je šošovka úplne čistá. (obr. 1 a obr. 2)
2. Ukazováčkom a prostredníkom ľavej ruky si podržte otvorené horné viečko. Zároveň si prostredníkom pravej ruky pridržajte spodné viečko a pozerať sa priamo na oko v zrkadle. Teraz si šošovku môžete opatrně nasadiť na oko. (obr. 3)

VLOŽENIE ĽAVEJ ŠOŠOVKY

Zopakujte všetky kroky uvedené vyššie.

VYBERANIE

1. Umyte a osušte si ruky, ako sa uvádza vyššie v časti „Všeobecné pokyny“.
2. Pozrite sa hore, podržte si dolné viečko a jemne stačte spodnú časť pravej šošovky ukazováčkom a palcom pravej ruky, pričom sa vyhnete kontaktu s nechtami. Šošovku si vyberte z oka. (obr. 4)
3. Rovnaký postup zopakujte pri odstraňovaní ľavej šošovky.

DEZINFEKCIA

Pred nasadením šošoviek a po ich vybratí ich vždy opláchnite roztokom, ktorý vám odporučí váš očný špecialista. Vo všeobecnosti sú vhodné viacúčelové roztoky pre hydrofilné kontaktné šošovky, napríklad viacúčelový roztok Bausch + Lomb Renu MultiPlus. Nepoužívajte roztoky pre tuhé alebo plynopropustné šošovky, ani dezinfekciu teplotou. Po vybratí šošoviek a ich dezinfekcii podľa odporúčaní ich uložte do puzdra naplneného viacúčelovým roztokom Bausch + Lomb Renu MultiPlus.

KONTRAIKADIKÁCIE

Nepoužívajte, ak nastanú niektoré z týchto stavov: Suché oko, konjunktivitída, zápal, edém, precitlivosť. Môže to mať za následok neprijemné pocity spôsobené svrbením, podráždením a prekrvením.

DOPĽNÚJÚCE ODPORUČANIA

Šošovky neuchopujte nechtami ani špičkami predmetmi, aby ste ich nepoškodili. Udržiavajte si krátke nechty. Nikdy nepoužívajte vodu z vodovodu, minerálnu vodu alebo akýkoľvek produkt, ktorý sa neodporúča na mäkké kontaktné šošovky. Nedovoľte, aby sa lak na vlasy alebo akýkoľvek kozmetický aerosól dostal do kontaktu so šošovkami. S nasadenými šošovkami sa nevenujte žiadnym vodným športom, pokiaľ nepoužívate tesne plavecké okuliare. Pred spaním si šošovky vždy vyberte. Šošovky si nasadzujte pred naličením a vyberajte ich pred odličovaním. Pred použitím akéhokoľvek lieku na oči sa vždy poraďte so svojim očným lekárom. Ak sú vaše oči začervenané a podráždené alebo ak pociťte akúkoľvek bolesť, okamžite si šošovky vyberte a navštívte svojho očného lekára. Svojho očného lekára navštevujte často. Produkt nepoužívajte, ak bolo balenie otvorené a poškodené. Uchovávať pri izbovej teplote. (1–30 °C)



1434

Made in Korea / Fabriqué en Corée

Datum revize 05-2024.

GD-B34P4-00-CZ,SK

Vysvětlení mezinárodních symbolů



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený



Prostudujte si návod k použití



Zplnomocněný zástupce pro Evropské společenství/
Evropskou unii



Výrobce



Sterilizováno parou



Datum spotřeby



Číslo šarže



Datum výroby



Omezení teploty



Medical Device

Nepoužívejte, ak je obal poškodený

Prečítajte si návod na použitie

Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/
Európskej únii

Výrobca

Sterilizácia pomocou pary

Dátum spotreby

Kód šarže


Dátum výroby

Teplotné limity

obr. 2



obr. 4

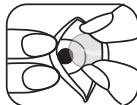

obr. 1



obr. 3



Dovozce/Dovozca:

Bausch + Lomb Netherlands B.V.-ALC

Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol-Rijk

The Netherlands